

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/przyrzad-do-bezpiecznego-usuwania-kleszczy-kick-the-tick-p-5380.html>

Przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick



Cena	10,90 zł
Numer katalogowy	547-001
Kod producenta	KTT-PRZY
Kod EAN	5904215273578

Opis produktu

Przyrząd do bezpiecznego usuwania kleszczy Kick The Tick to ważny dodatek do każdej domowej lub osobistej apteczki, pozwalający na szybkie i prawidłowe usunięcie ze skóry pasożyta, który stanowi zagrożenie dla naszego zdrowia i życia.

Bezpiecznie i łatwo

Kick the Tick to specjalnie opracowane narzędzie, dopasowane do budowy kleszcza, służące do samodzielnego i bezpiecznego usunięcia ze skóry tego niebezpiecznego pajęczaka.

Prawidłowe użycie przyrządu Kick the Tick minimalizuje ryzyko transmisji niebezpiecznych dla zdrowia czynników, które może wydzielać kleszcz w trakcie siłowej ekstrakcji.

Przyrząd do usuwania kleszczy Kick The Tick – lekka konstrukcja

Narzędzie zaprojektowano w taki sposób, by **pozwalalo na usunięcie kleszczy o wielkości od 0,8 do 5 mm**. Służą do tego 2 końcówki o różnym rozmiarze, umożliwiające **bezpieczne pozbycie się larw, nimf oraz dorosłych osobników**.

Kick the Tick wykonano z lekkiego tworzywa, dlatego może być stale przenoszone przy w kieszeni, portfelu lub apteczce. Środkowa część narzędzia ma ryflowanie, zapobiegające ześlizgiwaniu się palców podczas delikatnej operacji.

Przyrząd **pozwała na usuwanie kleszczy przyczepionych do skóry ludzi i zwierząt**.

Użytkowanie

Po dokonaniu wyboru odpowiedniej końcówki przyrząd należy docisnąć do skóry, wsunąć „pod kleszcza” w taki sposób by znalazł się w szczelinie końcówki. Następnie zdecydowanym ruchem wyciągamy kleszcza, unosząc przyrząd do góry.

Po usunięciu należy sprawdzić, czy w miejscu wkłucia nie pozostały fragmenty kleszcza. Po zdezynfekowaniu rany utylizujemy kleszcza lub dostarczamy go w próbówce do analizy laboratoryjnej. Po każdym użytkowaniu przyrząd i ręce należy umyć lub zdezynfekować.

Przyrząd do usuwania kleszczy Kick The Tick – cechy

- Umożliwia łatwe i bezpieczne usunięcie kleszcza;
- ergonomiczny kształt;
- zastosowane materiały umożliwiają precyzyjny zabieg;
- końcówki zaprojektowane z myślą o różnych rozmiarach kleszcza;
- wyrób medyczny.